



# QUICK START GUIDE



## 6.3 ColostroFIT Checkliste Kolostrumbank vorhanden


**1** Kalbung beginnt

**2** ColostroMAT steht auf Stand-by



**3** Kalb ist geboren

**4** ColostroBAG in den ColostroMAT einlegen und Profil 3 starten

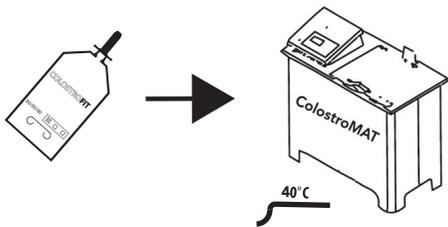

**Kalb**




Kalb so schnell wie möglich  
(spätestens 4 Stunden nach der Geburt)  
mit einem ColostroBAG füttern



ColostroBAG entsorgen




**Kuh**

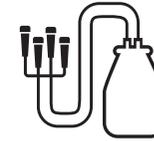


Kuh wird so schnell wie möglich gemolken



Kolostrum auf Qualität prüfen  
(Kolostrometer im grünen Bereich;  
Refraktometer >22 Brix%)

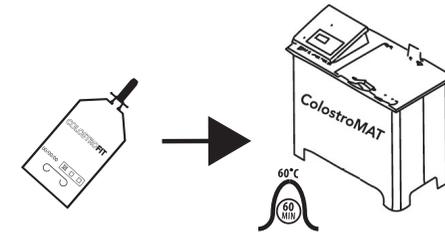

Kolostrum in Beutel abfüllen und  
pasteurisieren Profil 2

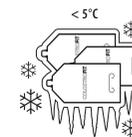

Pasteurisiertes Kolostrum lagern